

# Электрический прибор бытового назначения. Рециркулятор «Здоровое Дыхание».

**Снижает уровень инфекционных заболеваний таких как: Коронавирус COVID-19, ОРВИ, Грипп.**

Рециркулятор воздуха "Здоровое Дыхание" специально разработан для обеззараживания помещений в присутствии людей, животных и растений. Эффективность обеззараживания от вирусов и микробов достигает 99%. Уничтожает практически все известные на сегодняшний микробы и вирусы: Коронавирус COVID-19, (гриппа человека А(Н1N1), гриппа птиц А (Н5N2), свиного гриппа, туберкулеза).

## Категории и типы помещений для использования рециркулятора «Здоровое Дыхание».

- IV Детские игровые комнаты, школьные классы, детские дома, дома инвалидов, бытовые помещения промышленных и общественных зданий с большим скоплением людей при длительном их пребывании.
- V Курительные комнаты, общественные туалеты и лестничные площадки помещений ЛПУ.

Рециркулятор «Здоровое Дыхание» относится к классу облучателей закрытого типа, что подразумевает защиту от прямого воздействия ультрафиолетовых лучей на людей, животных и растений.

В частности, конструкция рециркулятора полностью исключает возможность вреда от ультрафиолета благодаря закрытому корпусу, а также специальным «лабиринтным экранам» на входе и выходе воздушного потока.

**Данный рециркулятор может быть использован для обеззараживания воздуха в присутствии людей.** Рекомендован для использования в присутствии растений и животных.

Это бытовые и жилые помещения, офисы, парикмахерские залы, косметические и маникюрные кабинеты, фитнес залы а так же продовольственные базы, магазины и другие производственные помещения, где необходимо обеззараживание воздуха в присутствии людей.

**Данные модели не являются медицинским изделием.**

**Время, которое необходимо затратить на обработку помещений различных объёмов при подготовке их к функционированию, показано в таблицах:**

Рециркулятор «Здоровое Дыхание» на 100 м <sup>2</sup>	Рециркулятор «Здоровое Дыхание» на 200 м <sup>2</sup>
Время очистки помещения площадью до 100 м <sup>2</sup> составляет 90 минут. Эффективность очистки 95%.	Время очистки помещения площадью до 200 м <sup>2</sup> составляет 120 минут. Эффективность очистки 95%.
Установлено 2 УФ лампы 36 ватт. Суммарная мощность 72 ватт.	Установлено 3 УФ лампы 36 ватт. Суммарная мощность 108 ватт.
Размер 205x205xH900. Масса рециркулятора не более 6 кг.	Размер 205x205xH900. Масса рециркулятора 8,5 кг.


## Используемые лампы.

OSRAM HNS L36 W2G11, Philips TUV PL-L36W/4P 2G11 или их аналоги.

Содержание ртути (Hg) (ном.) 4,4 мг. = 0,0044 грамма.

Применение увиолетового стекла в лампах препятствует возникновению озона O<sub>3</sub>

Отсутствует УФ излучение с длиной волны 185 нм, продуцирующего озон O<sub>3</sub>

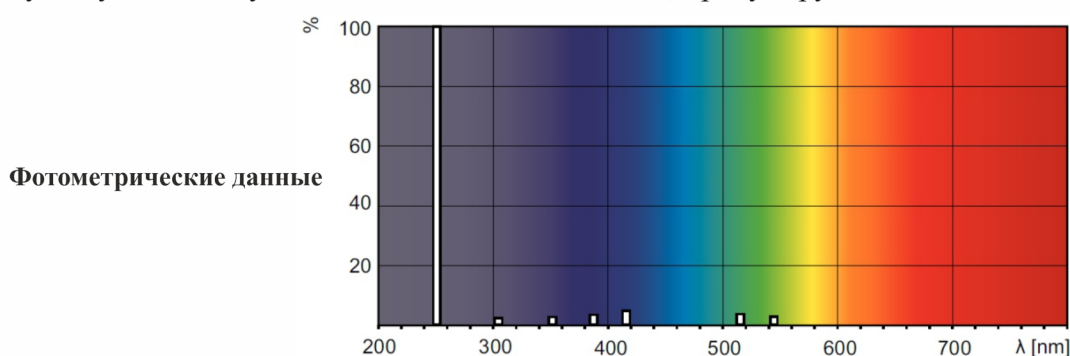

## **Обслуживание рециркулятора «Здоровое Дыхание».**

1. Рекомендуется один раз в год производить комплексную проверку рециркулятора в сервис центре производителя.
2. Замена ламп производится один раз в два года при условии ежедневной работы рециркулятора 8 часов в день.
3. В моделях рециркулятора «Здоровое Дыхание» оснащенные таймером наработки часов, замена ламп осуществляется в сервис центре производителя после достижения работы ламп 8000 часов.
4. Утилизация отработанных УФ ламп осуществляется за счет производителя.
5. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать рециркулятор при неработающем вентиляторе (отсутствует воздушный поток в верхней части рециркулятора)!  
Обратитесь в сервис центр производителя.

### **Комплектность.**

В комплект поставки рециркулятора входит:

- Рециркулятор «Здоровое Дыхание» - 1 шт.
- Упаковка рециркулятора - 1 шт.
- Паспорт изделия, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон - 1 шт.

### **Гарантийные обязательства.**

1. Гарантийный срок эксплуатации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования установлен 12 месяцев со дня ввода рециркулятора в эксплуатацию.  
Гарантийный срок хранения 1 год.
2. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель в случае возникновения гарантийной ситуации безвозмездно ремонтирует или заменяет рециркулятор.
3. В случае самостоятельного вскрытия рециркулятора, покупатель лишается гарантии и последующего обслуживания рециркулятора.